

## **Automatický přístroj pro sekvenční tlakovou drenáž lymfatického systému.**

Přístroj je určen pro léčbu mizních (lymfatických) otoků, žilní nedostatečnosti, dále je vhodný jako předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, rehabilitace poúrazových stavů spojená s otoky postižených končetin a mnohá další onemocnění lymfatického systému. Velké uplatnění má také v kosmetice (celulitida, kosmetická úprava hýždí, atd.).

Přístroj je také vhodnou pomůckou při rehabilitaci a regeneraci sportovců a osob po fyzické námaze.

Přístroj se skládá z vlastního přístroje a drenážních návleků na horní nebo dolní končetinu. Návleky jsou vícekomorové, aby umožnily intermitentní drenáž končetiny. Princip činnosti spočívá v postupném nafukování jednotlivých komor drenážního návleku dle zadaného programu. Používané drenážní tlaky se pohybují od 25 mm Hg do 60 mm Hg.



### **Indikace (hlavní):**

- lymfedém primární a sekundární
- cévní nedostatečnost
- křečové žíly
- revmatické otoky
- otoky po zánětu žil, pooperační a poúrazové otoky
- terapie bérkových vředů
- profilaxe žilní trombózy
- celulitida

### **Kontraindikace (hlavní):**

- akutní onemocněním srdce, jater a ledvin
- akutní virové nebo bakteriální onemocnění
- akutní žilní onemocnění, kožní záněty a tumory.

### **Varianty provedení a vybavení:**

#### **Lymfoven 14 S**

– výstup na 2 x 12 komor. Umožňuje spustit drenáž z centra a periferie. Dále je možné nastavit dobu aplikace, tlakový gradient, lokální drenáž a rychlost postupu tlakové vlny.

#### **Lymfoven 14 K**

– výstup na 2 x 12 komor. Umožňuje spustit drenáž z centra a periferie. Dále je možné nastavit dobu aplikace, tlakový gradient, lokální drenáž a rychlost postupu tlakové vlny. Přístroj je vybaven čtečkou čipových karet a třemi čipovými kartami s naprogramovanými ucelenými procedurami dle indikace.

#### **Nabídka návleků**

ve výbavě přístroje je standardně návlek 2x12 komor na dolní končetiny (kalhoty), volitelně lze objednat i návlek horní končetiny 2x12 komor zasahuje do axily